


Einfache Bedienung

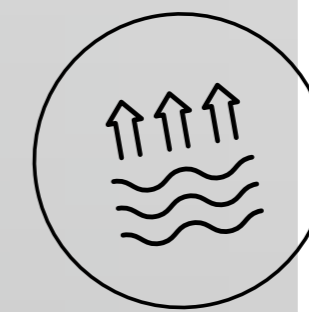

Mit Chipkarte

Bitte schieben Sie die Chipkarte auf der Oberseite des Bedienelements (12) ein und wählen Sie Ihren gewünschten Massagedruck indem Sie zuerst »Massagedruck« (10) und dann entsprechend »Plus« oder »Minus« drücken. Anschließend starten Sie mit »Start/Stop« (1) das Massageprogramm.

Vier therapeutische Programme stehen Ihnen auf Chipkarten zur Verfügung:

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| 1. BODY BASIC | 2. SPECIAL BACK |
| 3. EXTENDED BODY | 4. INDIVIDUELL PROGRAMMIERBAR |

Ohne Chipkarte

Bitte geben Sie die gewünschte Massagezeit ein und drücken Sie den Start-Button. Sie können den Massagebereich und die Wasserdruckstärke jederzeit ändern.

1 Start / Stop

Kurz auf »Start/Stop« drücken, um das Programm zu unterbrechen. Erneut auf »Start/Stop« drücken, um es fortzuführen. Drei Sekunden auf »Start/Stop« drücken, um das Programm ganz zu beenden.

2 Impuls-Massage

Die Impuls-Massage ist optimal zur Anregung der Durchblutung. Einmaliges Betätigen schaltet die Impuls-Massage ein (Diode an). Ein weiteres Betätigen stellt die Impuls-Massage wieder ab (Diode aus).

3 Massage im Lendenbereich

Die Massagedüsen bewegen sich nur im Lendenwirbelbereich.

4 Nacken-/Schultermassage

Die Massagedüsen bewegen sich nur im Nacken- und Schulterbereich.

5 Oberkörpermassage

Die Massagedüsen bewegen sich nur in der oberen Hälfte der Liegefläche.

6 Ganzkörpermassage

Die Massagedüsen bewegen sich auf der gesamten Liegefläche.

7 Unterkörpermassage

Die Massagedüsen bewegen sich nur in der unteren Hälfte der Liegefläche.

8 Punktmassage

Die Massagedüsen bewegen sich in kurzem Abstand vor und zurück. Warten Sie bei der Einstellung »Ganzkörpermassage«, bis die Düsen in Richtung Fuß fahrend den gewünschten Körperbereich erreicht haben, und drücken Sie dann »Punktmassage«.

9 Sektionsmassage

Die Massagedüsen bewegen sich in einem Bereich von ca. 20 cm. Warten Sie bei der Einstellung »Ganzkörpermassage«, bis die Düsen in Richtung Fuß fahrend den gewünschten Körperbereich erreicht haben, und drücken Sie dann »Sektionsmassage«.

10 Massagedruck

Bei Bedarf können Sie den Massagedruck des Wassers durch die Tasten »Plus« und »Minus« regulieren. Drücken Sie zuerst auf »Massagedruck« und dann entsprechend auf »Plus« oder »Minus«.

11 Massagezeit

Vor dem Start können Sie durch Drücken dieser Taste mit »Plus« und »Minus« die Massagedauer einstellen.

12 Chipkarteneinschub

Bitte schieben Sie die Programm- oder Bezahlkarte auf der Oberseite des Bedienpanels ein und drücken Sie den Start-Button (1).

13 Programmierungstaste

Diese Taste drücken Sie um bei eingesteckter Chipkarte (PROGRAMMABLE) in den Programmiermodus zu gelangen.

Hinweis:

Bitte legen Sie alle spitzen Gegenstände vor der Überwasser-Massage ab, da diese die Liegefläche beschädigen können. Aus Hygienegründen sollten Sie Ihre Schuhe vor der Massage ausziehen. **Nur bei Stillstand der Massagedüsen auf das Gerät legen oder aufstehen.**

